


エイトフィットサイズ決定要領

サイズを決めるための採寸要領

● デオドラントタイプ

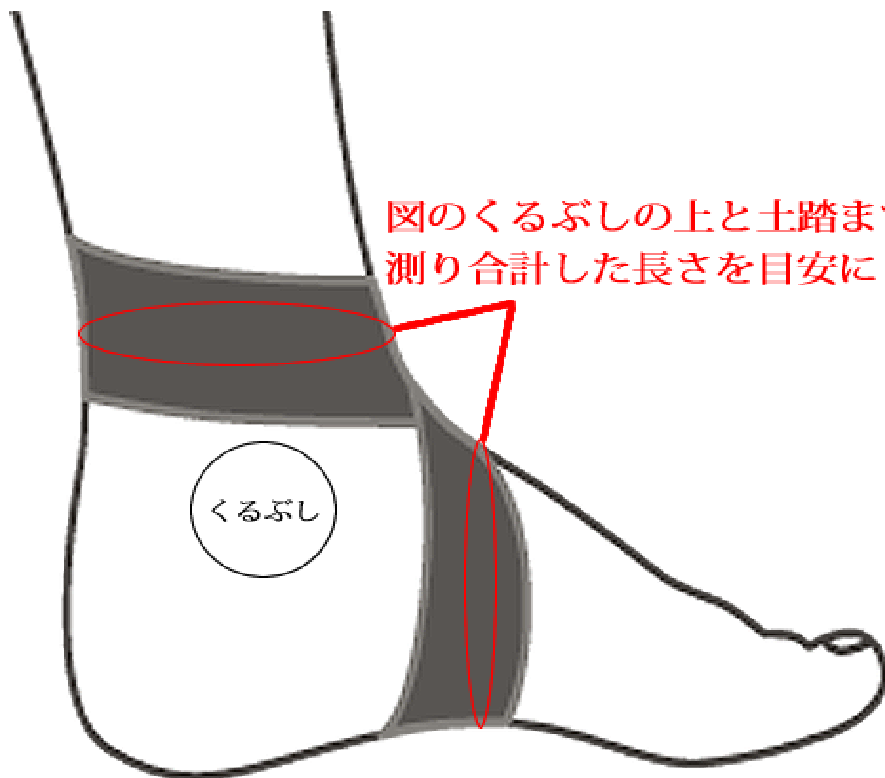

図のくるぶしの上と土踏まずのところを測り合計した長さを目安にしてください

サイズ表 (靴のサイズ)	
長さ	380mm-3 S (~20cm)
	400mm-S S (20~23cm)
	420mm-S (22~24cm)
	440mm-M (23~25cm)
	460mm-L (26~28cm)

例) くるぶしの上周り : 200mm

土踏まずの周り : 230mm


合計 : 430mm ⇒ ±10~20mmありますので

強めの圧迫感を希望するときは420mmのSを、

緩めの圧迫感を希望するときは440mmのMをお選びください。

エイトフィット・取扱い、説明

装着方法（上下、左右はありません）

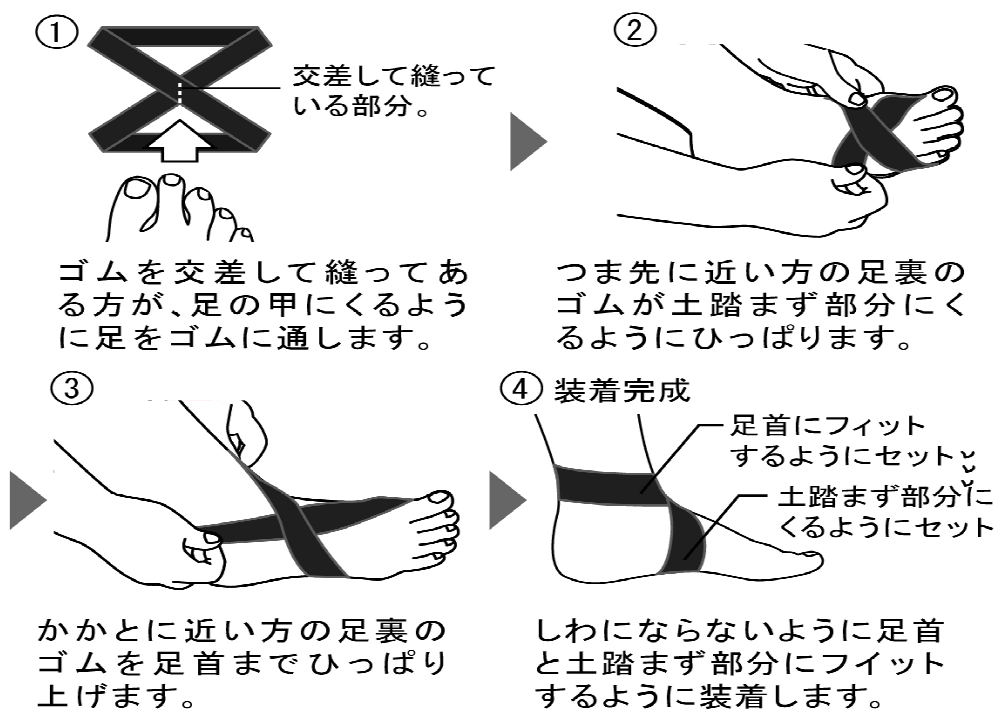

使用上のご注意

- 次の場合は**使用しない**でください。捻挫、骨折、傷、腫れ物、湿疹、かぶれなどの異常が装着部にある場合。末端血行障害がある、またはあると思われる方。慢性皮膚疾患やゴム素材によるアレルギーのある方。
- 使用中や使用後に発疹、湿疹、かゆみ、かぶれ、うっ血、痛み、むくみ等の異常が生じた場合は、直ちに**使用を中止し、医師にご相談**ください。
- 指定部位以外に使用しないでください。
- 就寝時には使用しないでください。
- 商品に破損が見られた場合は使用しないでください。
- 長時間の連続装着はお避けください。
- 使用中にたるみやズレが生じた場合は、必ず正しい位置に装着し直してください。
- 汗や摩擦などにより、色落ちや色移りする場合があります。
- 素材の特性上、使用状況などにより、しわ、型崩れ、ゴムの伸びが発生する場合があります。
- 血行障害や糖尿病の神経障害で痛みを感じにくくなっている方は、医師に相談の上ご使用ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- デオドラント効果は使用条件で異なります。
- 本品は治療用ではありません。（痛みの軽減を保障するものではありません）
- パッケージの説明書は保存してください。

お手入れ方法

- 中性洗剤を使用して30度以下の水で優しく押し洗いし、形を整えて陰干ししてください。
- ゴムの素材は漂白剤により劣化しますので絶対にお避けください。
- アイロン、洗濯機のご使用は避けてください。
- タンブラー乾燥、ドライクリーニングはお避けください。
- 液体洗剤には漂白剤が含まれているものがあります、固形石鹼での手洗いをお勧めします。