

エイトフィットサイズ決定要領

サイズを決めるための採寸要領

● スウィンタックタイプ



図のくるぶしの上と土踏まずのところを測り
合計した長さに10~20mmプラスした長さを
目安にしてください

サイズ表 (靴のサイズ)	
長さ	400mm-SS (20~22cm)
	420mm-S (22~24cm)
	440mm-M (24~26cm)
	460mm-L (26~28cm)
	480mm-L L (28~ cm)


例) くるぶしの上周り : 200mm
土踏まずの周り : 230mm

合計 : 430mm ⇒ +10~20mm = 440mm~450mm

強めの圧迫感を希望するときは440mmのMを、
緩めの圧迫感を希望するときは460mmのLをお選びください。

エイトフィット・取扱い、説明

装着方法（上下、左右はありません）

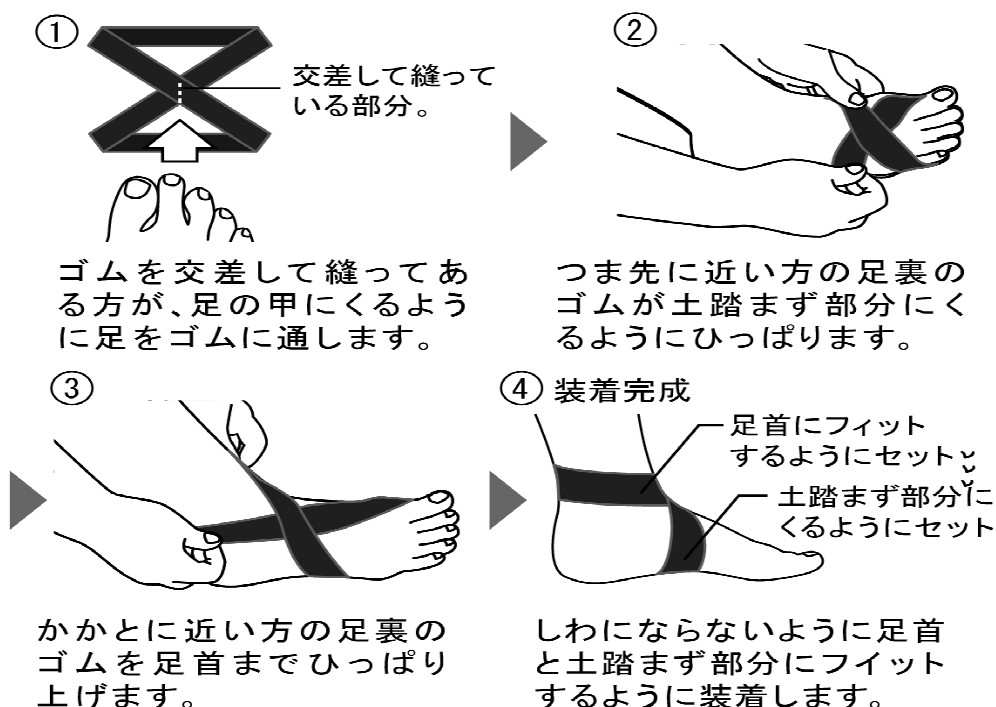

使用上のご注意

- 次の場合は**使用しない**でください。捻挫、骨折、傷、腫れ物、湿疹、かぶれなどの異常が装着部にある場合。末端血行障害がある、またはあると思われる方。慢性皮膚疾患やゴム素材によるアレルギーのある方。
- 使用中や使用後に発疹、湿疹、かゆみ、かぶれ、うっ血、痛み、むくみ等の異常が生じた場合は、直ちに**使用を中止し、医師にご相談**ください。
- 指定部位以外に使用しないでください。
- 就寝時には使用しないでください。
- 商品に破損が見られた場合は使用しないでください。
- 長時間の連続装着はお避けください。
- 使用中にたるみやズレが生じた場合は、必ず正しい位置に装着し直してください。
- 汗や摩擦などにより、色落ちや色移りする場合があります。
- 素材の特性上、使用状況などにより、しわ、型崩れ、ゴムの伸びが発生する場合があります。
- 血行障害や糖尿病の神経障害で痛みを感じにくくなっている方は、医師に相談の上ご使用ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- デオドラント効果は使用条件で異なります。
- 本品は治療用ではありません。（痛みの軽減を保障するものではありません）
- パッケージの説明書は保存してください。

お手入れ方法

- 中性洗剤を使用して30度以下の水で優しく押し洗いし、形を整えて陰干ししてください。
- ゴムの素材は漂白剤により劣化しますので絶対にお避けください。
- アイロン、洗濯機のご使用は避けてください。
- タンブラー乾燥、ドライクリーニングはお避けください。
- 液体洗剤には漂白剤が含まれているものがあります、固形石鹼での手洗いをお勧めします。